

Soluscope™ PAA



Disinfettante per riprocessamento automatico degli endoscopi

Disinfettante per endoscopi flessibili da utilizzare esclusivamente con Soluscope Serie 4 PA, Serie XS e Serie 5

- Disinfettante a base di acido peracetico
- Attività antimicrobica ad ampio spettro
- Conforme a EN ISO 15883-4
- Compatibile con un'ampia gamma di endoscopi flessibili
- Sistema di aggancio univoco e pescante integrato alla tanica



Soluscope™ PAA

Disinfettante per endoscopi flessibili da utilizzare esclusivamente con Soluscope Serie 4 PA, Serie XS e Serie 5



Soluscope Serie 4 PA



Soluscope Serie XS



Soluscope Serie 5

Composizione prodotto

- 5% (p/p) di acido peracetico
- Agenti stabilizzanti

Caratteristiche di prodotto

- Shelf-life: 24 mesi a confezione chiusa
- Aspetto: chiaro e senza colore
- Odore: caratteristico
- pH prodotto puro: 1 - 4,2*
- Peso Specifico a 20°C: 1,10 - 1,13
- Indice di Rifrazione: 1,35 - 1,37
- Viscosità: < 10 mPa/s

*Misurazione del valore pH in condizioni operative sempre tramite pHmetro con compensazione della temperatura.

Proprietà microbiologiche

Claim/Conditions	Concentrazione	Tempo di contatto	Temperatura
Soluscope Serie 4 PA (in WD) e Soluscope Serie 5 (in WD)			
Battericida* (EN 13727, EN 14561), Micobattericida* (EN 14348, EN 14563), Fungicida* (EN 13624, EN 14562) & Virucida* (EN 14476, EN 17111)	1,8%	3 minuti	40°C
Soluscope Serie XS (in WD)			
Battericida* (EN 13727, EN 14561), Micobattericida* (EN 14348, EN 14563), Fungicida* (EN 13624, EN 14562) & Virucida* (EN 14476, EN 17111)	1,0%	6 minuti	40°C

Consultare il manuale dell'apparecchio di lavaggio e disinfezione per le condizioni per l'uso

* condizioni di pulizia

Informazioni d'ordine

Prodotto	Formato	CND	RDM	Codice d'ordine
Soluscope PAA	2 x 5 L	D050101 - ACIDO PERACETICO E ACETICO CON PEROSSIDO DI IDROGENO PER DISINFEZIONE DI DISPOSITIVI MEDICI	2675794/R	2206736BH

 **SOLUSCOPE SAS**
(an Ecolab Company)
100, Rue du Fauge
Z.I Les Paluds - 13400
Aubagne - France
0297

Distribuito da:
ECOLAB SRL
Nuova Farmec
Via W. Flemming, 7
37026 SETTIMO DI PESCANTINA VR
Italia
www.ecolab.com

Istruzioni per l'utilizzo

Soluzione concentrata

- Avvitare il tappo rosso sulla tanica. Assicurarsi che il foro di sfogo non sia ostruito
- Posizionare la tanica al posto corretto e connetterla alla lavaendoscopi (fare riferimento al manuale della lavaendoscopi)
- Diluizione automatica per lavaendoscopi

Durata di conservazione dopo l'apertura: 2 mesi in caso di collegamento all'apparecchio di lavaggio e disinfezione (scrivere la data di apertura nel punto previsto a tale scopo).

Stoccaggio

Attenzione - rispettare le precauzioni d'utilizzo (stabilite in accordo alle regole Europee in atto riguardo alla classificazione e all'etichettatura di prodotti chimici). Conservare tra i +5°C e i +25°C.

Uso sicuro del dispositivo medico

Classe IIb

Leggere attentamente le informazioni sull'etichetta del prodotto.



SOLO PER USO PROFESSIONALE.

ECOLAB®
PROTECTING WHAT'S VITAL™