



TECNICA DI STROFINAMENTO DELLE MANI TRAINING BOX

BOX PEDAGOGICO

PER LA FORMAZIONE E LA DIMOSTRAZIONE DELLA CORRETTA DISINFEZIONE DELLE MANI

- Design leggero ed ecologico
- Facile da montare
- Facilità d'uso sia per l'insegnante che per l'utente
- Tecnologia LED-UV (2 lampade a batteria)
- Da usare in combinazione con un gel fluorescente per il training



BOX PEDAGOGICO

INDICAZIONI

Il box pedagogico è destinato alla corretta dimostrazione della tecnica di disinfezione delle mani. Utilizzando un disinfettante per mani fluorescente (Aniosgel 85 NPC fluorescente), dopo lo sfregamento, le aree di pelle che non sono state coperte possono essere visualizzate con l'aiuto della tecnologia LED.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni:

Imballaggio piatto: L 74 x P 50,5 x H 7 cm

Scatola montata: L 53,5 x P 38,5 x H 41 cm

Una volta montata, la scatola non è destinata ad essere smontata dopo l'uso.

Descrizione:

- Fabbricato in cartone riciclabile al 100%.
- Dotato di una maniglia per il trasporto e di una doppia visualizzazione (utente/insegnante).

Caratteristiche:

- 2 x 51 lampade a LED.
- Funziona con 2 x 3 batterie LR06 AA (incluse)*.

RIFERIMENTI

PRODOTTO	CODICE D'ORDINE
Box completo (box pedagogico + 2 lampade + 6 batterie*)	AN0425210
ANIOSGEL 85 NPC con fluorescina - 6 flaconi, 300 ml ognuno	AN1759366

* Le batterie sono fornite con le lampade.

In caso di usura o malfunzionamento, è responsabilità del cliente sostituirle.

INDICAZIONI PER L'USO

1. Disporre la scatola (ancora da montare) con la finestra di visualizzazione in alto
2. Posizionare le 2 lampade e la bottiglia nelle aree previste sulla parte superiore della scatola
3. Una volta che la luce UV è visibilmente accesa, il training può iniziare
4. Prendere una quantità sufficiente di prodotto fluorescente (Aniosgel 85 NPC fluorescente) versandolo su una mano a coppa
5. Bagnare completamente le mani, prestando particolare attenzione ai polpastrelli, alle aree delle unghie e ai pollici
6. Strofinare per almeno 30 secondi
7. Guidare entrambe le mani attraverso le aperture nella scatola
8. Controllare il livello della performance attraverso la finestra di visualizzazione trasparente

Valutazione dei risultati:

Le aree di pelle che non sono disinfettate correttamente (dove non è stato applicato il gel disinfettante), sono quelle aree delle mani che non diventano fluorescenti sotto la luce UV (aree scure).

Consultare il formatore per analizzare i risultati.

PRECAUZIONI PER L'USO

Leggere le istruzioni del produttore prima di usare il dispositivo. Osservare le precauzioni per l'uso sull'etichetta del prodotto utilizzato (redatto secondo le norme europee vigenti in materia di classificazione ed etichettatura dei prodotti chimici). Le informazioni sono disponibili sulla scheda di sicurezza e sull'etichetta.