



GEL ALCOLICO PER LE MANI A SCOPO DIDATTICO

Aniosgel 85 NPC Fluorescente

GEL A BASE ALCOLICA PER LE MANI PENSATO PER ESSERE UTILIZZATO DURANTE LA FORMAZIONE PER L'IGIENE DELLE MANI

Gel tissotropico con emollienti cosmetici e un liquido fluorescente.


- Fornisce una formazione eccellente sull'igiene delle mani
- Da utilizzare con attrezzature didattiche adeguate (tecnologia LED-UV)
- Per analizzare e migliorare la tecnica di frizione delle mani
- Efficace e ad elevata facilità d'utilizzo




Aniosgel 85 NPC Fluorescente

Gel alcolico per le mani a scopo didattico


ISTRUZIONI PER L'USO

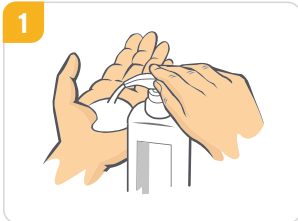


1 Applicare 3ml di Aniosgel 85 NPC Fluorescente sul palmo della mano.

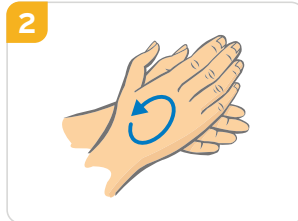


2 Coprire l'intera superficie delle mani strofinando palmo contro palmo.

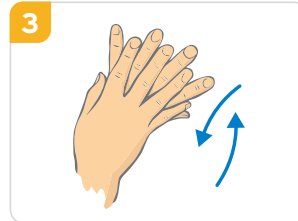

3 Spalmare Aniosgel 85 NPC Fluorescente sul dorso di ogni mano con le dita intrecciate.

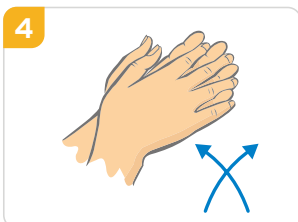


4 Strofinare palmo contro palmo con le dita intrecciate.

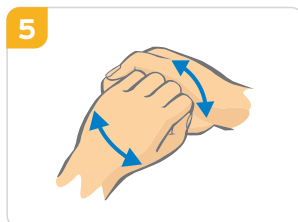


5 Stringere le dita delle mani e strofinare da entrambi i lati ruotando avanti e indietro.




6 Prendere il pollice della mano opposta e ruotare.

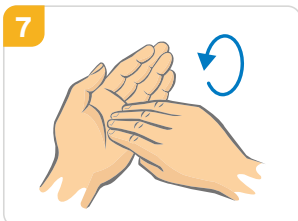

7 Premere le dita sul palmo di ogni mano e ruotare.

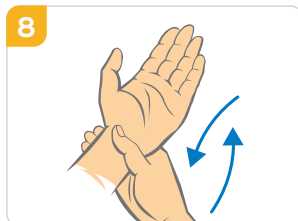


8 Strofinare i polsi con la mano opposta.

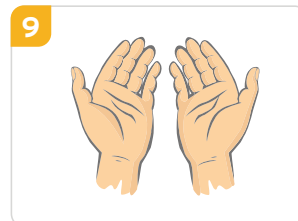

9 Una volta asciutte, le tue mani sono sicure.

INFORMAZIONI D'ORDINE

PRODOTTO	UNITÀ DI CONFEZIONAMENTO	CODICE D'ORDINE
Aniosgel 85 NPC Fluorescente	6 x 300ml con pompa integrata	AN1759366

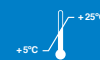

PRODOTTO BIOCIDA PER L'IGIENE UMANA (GRUPPO PRINCIPALE 1 - PT1).

UTILIZZARE I BIOCIDI IN MODO SICURO. LEGGERE SEMPRE L'ETICHETTA E LE INFORMAZIONI SUL PRODOTTO PRIMA DELL'USO.



LABORATOIRES ANIOS
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

Distribuito da:
NUOVA FARMAC SRL
Via W. Flemming, 7
37026 Settimo di Pescantina
Verona
Italy



www.ecolab.com

www.anios.com