

DETERGENTE PER IL RIPROCESSAMENTO AUTOMATICO DEGLI ENDOSCOPI

SOLUSCOPE™ ECL ENZYMATIC CLEANER

**DETERGENTE PER ENDOSCOPI FLESSIBILI. DA
UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE CON SOLUSCOPE
SERIE 5, SERIE XS E SOLUSCOPE SERIE TEE**

- Detergente monoenzimatico
- Efficacia comprovata contro biofilm e proteine
- Conforme alla norma EN ISO 15883-4
- Compatibile con un'ampia gamma di endoscopi flessibili e sonde TEE
- Sistema di aggancio univoco e pescante integrato alla tanica



SOLUSCOPE™ ECL ENZYMATIC CLEANER

Detergente per endoscopi flessibili e sonde TEE. Da utilizzare esclusivamente con Soluscope Serie 5, Serie XS e Soluscope Serie TEE



SOLUSCOPE SERIE 5



SOLUSCOPE SERIE XS



SOLUSCOPE SERIE TEE

COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO

- Tensioattivi non ionici
- Chelati
- Proteasi
- Eccipienti

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Liquido da giallo chiaro ad ambrato
- Densità a 20°C: 1,1 g/mL
- pH prodotto puro a 20°C: circa 10,1*
- pH diluito allo 0,5%: circa 7,5*
- Conduttività allo 0,5%: 552 µS/cm

*Misurazioni del valore pH in condizioni operative sempre mediante un pH-metro con compensazione della temperatura.

INFORMAZIONI D'ORDINE

PRODOTTO	FORMATO	CODICE D'ORDINE	CND	RDM
Soluscope ECL Enzymatic Cleaner	2 x 5 L	3114542BN	D0801 - Detergenti enzimatici per dispositivi medici	2675721/R

ISTRUZIONI PER L'USO

- Avvitare il tappo bianco collegato al Soluscope WD sul contenitore (fare riferimento al manuale utente WD)
- Periodo di validità dopo l'apertura: 2 mesi se collegato alla lavadisinfettatrice (scrivere la data di apertura sull'etichetta nell'apposito spazio)
- Assicurarsi che il forellino di ventilazione non sia ostruito
- Diluizione automatizzata

STOCCAGGIO

Attenzione - rispettare le precauzioni d'uso (redatte secondo le vigenti norme europee in materia di classificazione ed etichettatura dei prodotti chimici).

UTILIZZO SICURO DEL DISPOSITIVO MEDICO

Dispositivo medico di classe I. Leggere attentamente le informazioni sull'etichetta del prodotto.



SOLO PER USO PROFESSIONALE.



SOLUSCOPE SAS
(An Ecolab Company)
100, rue du Fauge
Z.I Les Paluds - 13400
Aubagne - France

Distribuito da:
NUOVA FARMEC SRL
Via W. Flemming, 7
37026 Settimo di Pescantina
Verona
Italia



www.ecolab.com



www.soluscope.com