

TRAINING BOX PER LA TECNICA DI STROFINAMENTO DELLE MANI

BOX PEDAGOGICO

TRAINING PER MOSTRARE LA CORRETTA DISINFEZIONE DELLE MANI

- Materiale ad alta resistenza (PVC ad alta pressione)
- Facilità d'uso per il trainer e l'utente
- Collegabile al monitor
- Tecnologia LED-UV
- Da usare in combinazione con un gel fluorescente per la formazione



BOX PEDAGOGICO

INDICAZIONI

Il box pedagogico è destinato alla formazione per mostrare la corretta disinfezione delle mani. Utilizzando un disinfettante per mani fluorescente (Aniosgel 85 NPC con fluorescina), dopo lo sfregamento, le aree di pelle che non sono state coperte possono essere visualizzate con l'aiuto della tecnologia LED.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni:

Misure: L 52cm x D 41cm x H 40cm
Peso: 3.5kg.

Descrizione:

Progettato in materiale PVC ad alta resistenza e ad alta pressione.

- Materiale dotato di una maniglia per il trasporto e di una doppia vista (utente/trainer).

Specifiche elettriche:

Alimentazione: 230 V monofase + PE 50 Hz / Potenza: 23 VA.

Alimentazione:

Tramite presa standardizzata 10/16 A 230 V monofase + PE 50 Hz, protetta da un dispositivo differenziale di 30 mA max.

Elementi elettrici:

- 3 LED ultravioletti da 3W.
- 1 presa maschio a 2 poli +PE, con 5 fusibili da 20 mm (315 mA) e interruttore.
- 1 cavo di alimentazione 2 poli +PE.

RIFERIMENTI

PRODOTTO	CODICE D'ORDINE
Box completo con telecamera	AN0425044LCD
ANIOSGEL 85 NPC con fluorescina - 6 flaconi, 300 ml ciascuno	AN1759366

INDICAZIONI PER L'USO

1. Prelevare una quantità sufficiente di prodotto fluorescente (es.: Aniosgel 85 NPC fluorescente) in una mano a coppa.

Bagnare completamente le mani, prestando particolare attenzione ai polpastrelli, alle unghie e ai pollici. Strofinare per almeno 30 secondi.

2. Far passare entrambe le mani attraverso le aperture della scatola.

Valutazione dei risultati:

Le aree di pelle che non sono disinfettate correttamente (dove manca il gel), sono quelle aree delle mani che non diventano fluorescenti sotto la luce UV (aree scure). Consultare il trainer per analizzare i risultati.

PRECAUZIONI PER L'USO

Leggere le istruzioni del produttore prima di usare il dispositivo. Osservare le precauzioni per l'uso sull'etichetta del prodotto utilizzato (redatto secondo le norme europee vigenti in materia di classificazione ed etichettatura dei prodotti chimici). Le informazioni sono disponibili sulla scheda di sicurezza e sull'etichetta.