



PULIZIA E PRE-DISINFEZIONE DEGLI STRUMENTI

Anios'Clean Excel D

DETERGENTE PRE-DISINFETTANTE PER STRUMENTI

- Concetto brevettato
- Combinazione originale di principi attivi in sinergia
- Non corrosivo, compatibile con un'ampia gamma di materiali
- Adatto per il bagno ad ultrasuoni
- Compatibile con gli strumenti robotici da Vinci



DM Classe IIb

D99 - Disinfettanti, antisettici, agenti sterilizzanti e
detergenti di dispositivi medici - altri


Anios'Clean Excel D

Detergente pre-disinfettante per strumenti


CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Soluzione blu limpida
- pH prodotto puro: min 6,5 - max 7,5
- pH allo 0,5% nell'acqua del rubinetto: 7,4
- pH allo 0,5% in acqua dolce: 7,6
- pH allo 0,5% in acqua demineralizzata: 6,6


ISTRUZIONI PER L'USO

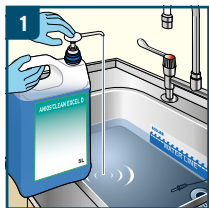


Soluzione concentrata. Prima del primo utilizzo, preparare la pompa associata. Utilizzare in ammollo con la diluizione richiesta, rispettando un tempo di contatto minimo di 5 min.

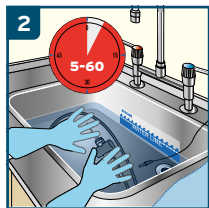

Immergere completamente il dispositivo medico. Tenere coperto il bagno di ammollo durante il tempo di contatto. Spazzolare in caso di sporco visibile.

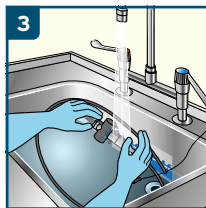

Risciacquare i dispositivi medici con abbondante acqua di rubinetto per eliminare qualsiasi traccia di prodotto e sporco organico.

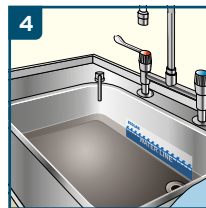

Sostituire la soluzione quando è visibilmente sporca o almeno una volta al giorno per mantenere l'efficacia del prodotto.

PROPRIETÀ MICROBIOLOGICHE

CLAIM/CONDIZIONI	CONCENTRAZIONE	TEMPO DI CONTATTO
Battericida* secondo EN 13727/EN 14561	0,5%	5 min
Lieviticida* secondo EN 13624/EN 14562	0,5%	15 min
Tubercolicida* secondo EN 14348/EN 14563	2,0%	60 min
Attivo sui virus incapsulati secondo EN 14476/EN 17111	0,5%	15 min
Attivo su Polyomavirus SV40* secondo EN 14476/EN 17111	2,0%	60 min

*=condizioni di sporco

INFORMAZIONI D'ORDINE

PRODOTTO	UNITÀ DI CONFEZIONAMENTO	CODICE D'ORDINE	CND	RDM
Anios'Clean Excel D	12 bottiglie da 1 L	24160956C	D99 - Disinfettanti, antisettici, agenti sterilizzanti e detergenti di dispositivi medici - altri	2629799/R
Anios'Clean Excel D	4 taniche da 5 L con pompa da 25 ml	24160366C	D99 - Disinfettanti, antisettici, agenti sterilizzanti e detergenti di dispositivi medici - altri	2629799/R
Anios'Clean Excel D	2 taniche da 5 L	24160386C	D99 - Disinfettanti, antisettici, agenti sterilizzanti e detergenti di dispositivi medici - altri	2629799/R



LABORATOIRES ANIOS
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

Distribuito da:
ECOLAB SRL
Via Trento 26
20871 VIMERCATE (MB)
Italia

AREA DI APPLICAZIONE

Pulizia e disinfezione dei dispositivi medici: strumentazione medico-chirurgica, strumentazione termosensibile e materiale endoscopico prima della sterilizzazione.

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Soluzione concentrata. Prima del primo utilizzo, preparare la pompa associata. Utilizzare in ammollo con la diluizione richiesta, rispettando un tempo di contatto minimo di 5 min.
2. Immergere completamente il dispositivo medico. Tenere coperto il bagno di ammollo durante il tempo di contatto. Spazzolare in caso di sporco visibile.
3. Risciacquare i dispositivi medici con abbondante acqua di rubinetto per eliminare qualsiasi traccia di prodotto e sporco organico.
4. Sostituire la soluzione quando è visibilmente sporca o almeno una volta al giorno per mantenere l'efficacia del prodotto.

INGREDIENTI

Cloruro di didicildimetilammonio, digluconato di clorexidina, tensioattivi non ionici, profumo, colorante, eccipienti.

STOCCAGGIO

Pericoloso - rispettare le precauzioni d'uso (redatte secondo le norme europee vigenti in materia di classificazione ed etichettatura dei prodotti chimici). Stoccaggio: tra +5°C e +25°C.

CERTIFICATI

Dispositivo medico. La completa attività antimicrobica di Anios'Clean Excel D è inclusa nel dossier scientifico, disponibile su richiesta.

UTILIZZO SICURO DEL DISPOSITIVO MEDICO

Si prega di leggere l'etichetta e le informazioni sul prodotto.



SOLO PER USO PROFESSIONALE.



www.ecolab.com