

# DETERGENTE CHELANTE PER LAVAPADELLE TERMICHE

## Anios LB 200

### DETERGENTE CONCENTRATO DI RISCIACQUO CON pH LEGGERMENTE ALCALINO PER IL TRATTAMENTO NELLE VASCHE DI LAVAGGIO TERMICHE

- Potere chelante in ambienti debolmente alcalini
- Potere disperdente dei sali di calcio
- Può essere utilizzato in qualsiasi qualità di acqua (acqua di rubinetto o acqua trattata)
- Senza EDTA e NTA
- Privo di Fosfati



### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Liquido limpido da incolore a giallo
- pH del prodotto puro\* circa 9,5
- pH diluito allo 0,05%\*: 9,7
- pH diluito allo 0,5%\*: 10,4
- Densità (prodotto puro) a +20°C: 1,071 g/ml
- Conduttività allo 0,05% e allo 0,5%: 54,7 - 468 µS/cm
- Viscosità (prodotto puro): 4 mPa·s

\* Misurazione del valore di pH in condizioni di utilizzo sempre mediante un pH metro con temperatura di compensazione.

### INFORMAZIONI D'ORDINE E CONFEZIONAMENTO

PRODOTTO	UNITÀ DI CONFEZIONAMENTO	CODICE D'ORDINE
Anios LB 200	2 x 5 L tanica	AN2159038



**CE** LABORATOIRES ANIOS  
1, Rue de l'Espoir  
59260 Lezennes  
France

Distribuito da:  
**NUOVA FARMAC SRL**  
Via W. Flemming, 7  
37026 Settimo di Pescantina  
Verona  
Italy

**ECOLAB**

www.ecolab.com

LABORATOIRES  
**ANIOS**  
An Ecolab Company

www.anios.com

### AREA DI APPLICAZIONE

Prodotto sequestrante e disperdente del carbonato di calcio per tutti i tipi di acqua. Previene i depositi di calcare nel dispositivo e sull'attrezzatura. Compatibile con le vasche, il vetro, l'acciaio inossidabile e le bottiglie di plastica per l'urina.

### ISTRUZIONI PER L'USO

Soluzione concentrata per uso professionale. Diluire secondo il programma delle lavapadelle e la durezza dell'acqua (da 0,5 a 5 ml/litro).

### INGREDIENTI

Agenti sequestranti in una soluzione acquosa.

### STOCCAGGIO

Pericoloso. Rispettare le precauzioni per l'utilizzo (Redatto secondo le norme europee vigenti in materia di classificazione ed etichettatura dei prodotti chimici). Conservazione: tra +5°C e +25°C.

### CERTIFICATI

Su richiesta saremo lieti di fornirvi i certificati.

### USO SICURO DEL DISPOSITIVO MEDICO

Leggere le informazioni e l'etichetta del prodotto.



SOLO PER USO PROFESSIONALE