

DETERGENTE CHELANTE PER LAVAPADELLE TERMICHE

Anios LB 300

DETERGENTE CONCENTRATO DI RISCIACQUO PER IL TRATTAMENTO NELLE VASCHE DI LAVAGGIO TERMICHE

- Detergente alcalino
- Disperdente dei sali di calcio
- Può essere usato in qualsiasi tipo di acqua di rubinetto o trattata
- Potere chelante
- Senza EDTA e NTA
- Privo di Fosfati

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Liquido da incolore a giallo
- pH del prodotto puro* a +20°C: circa 13,3
- pH diluito allo 0,1%*: circa 11,1
- pH diluito allo 0,3%*: circa 11,5
- Densità (prodotto puro) a +20°C: 1,096 g/ml
- Conduttività allo 0,1% e allo 0,3%: 275 - 755 µS/cm
- Viscosità (prodotto puro): 3 mPa·s

* Misurazione del valore di pH in condizioni di utilizzo sempre mediante un pH metro con temperatura di compensazione.

INFORMAZIONI D'ORDINE E CONFEZIONAMENTO

PRODOTTO	UNITÀ DI CONFEZIONAMENTO	CODICE D'ORDINE
Anios LB 300	2 x 5 L tanica	AN2160034



CE LABORATOIRES ANIOS
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

Distribuito da:
NUOVA FARMAC SRL
Via W. Flemming, 7
37026 Settimo di Pescantina
Verona
Italy

ECOLAB

www.ecolab.com

LABORATOIRES
ANIOS
An Ecolab Company

www.anios.com



AREA DI APPLICAZIONE

Prodotto sequestrante del carbonato di calcio per acqua di media durezza. Previene i depositi di calcare nell'apparecchio e sull'attrezzatura. Compatibile con le vasche, il vetro, l'acciaio inossidabile e le bottiglie di plastica per l'urina.

ISTRUZIONI PER L'USO

Soluzione concentrata per uso professionale. Diluire secondo il programma delle lavapadelle e la durezza dell'acqua (da 1 a 3 ml/litro).

INGREDIENTI

Agenti sequestranti in un medium alcalino.

STOCCAGGIO

Pericoloso. Rispettare le precauzioni per l'utilizzo (Redatto secondo le norme europee vigenti in materia di classificazione ed etichettatura dei prodotti chimici). Conservazione: tra +5°C e +25°C.

CERTIFICATI

Su richiesta saremo lieti di fornirvi i certificati.

USO SICURO DEL DISPOSITIVO MEDICO

Leggere le informazioni e l'etichetta del prodotto.



SOLO PER USO PROFESSIONALE