



AGENTE NEUTRALIZZANTE DI RISCIAQUO PER LA STRUMENTAZIONE

Anios RDA

AGENTE NEUTRALIZZANTE DI RISCIAQUO, ATTIVATORE DI ASCIUGATURA

- Per un finish più splendente e senza tracce
- Può essere utilizzato con qualsiasi qualità d'acqua
- Elevata compatibilità con i polisolfoni e il poliossimetilene



Anios RDA

Agente neutralizzante di risciacquo, attivatore di asciugatura



Anios RDA
5 L tanica

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Giallo pallido, liquido trasparente
- pH prodotto puro a 20°C: min 2,1 - max. 4
- pH diluito allo 0,03%*: circa 4
- pH diluito allo 0,1%*: circa 3,6
- Densità a 20°C: 1,035
- Conduttività dallo 0,03% allo 0,1%: 67 - 139 $\mu\text{S}/\text{cm}$

* Misurazione del valore di pH in condizioni di utilizzo sempre mediante un pH metro con temperatura di compensazione.

INFORMAZIONI D'ORDINE E CONFEZIONAMENTO

PRODOTTO	UNITÀ DI CONFEZIONAMENTO	CODICE D'ORDINE
Anios RDA	2 x 5 L tanica	AN2372038

AREA DI APPLICAZIONE

Prodotto per il risciacquo di strumenti medico-chirurgici e dispositivi medici in una macchina automatica alimentata sia con acqua purificata che non purificata per osmosi. Effetto neutralizzante sui residui alcalini dei detergenti, rimozione dei residui minerali dall'acqua durante il ciclo di lavaggio. Attivatore di asciugatura.

ISTRUZIONI PER L'USO

Soluzione concentrata per uso professionale. Utilizzare ad una diluizione da 0,03% a 0,1% (cioè da 0,3 a 1 ml per litro d'acqua) durante il ciclo di risciacquo. Compatibile con i cicli di disinfezione termica.

INGREDIENTI

Tensioattivi non ionici e anionici, acido lattico, etanolo ed eccipiente.

STOCCAGGIO


Pericoloso - rispettare le precauzioni per l'utilizzo (redatto secondo le norme europee vigenti in materia di classificazione ed etichettatura dei prodotti chimici). Conservazione: tra +5°C e +25°C.

CERTIFICATI

Su richiesta saremo lieti di fornirvi i certificati.

USO SICURO DEL DISPOSITIVO MEDICO

Leggere le informazioni e l'etichetta del prodotto.

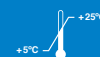

SOLO PER USO PROFESSIONALE



LABORATOIRES ANIOS
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

Distribuito da:
NUOVA FARMAC SRL
Via W. Flemming, 7
37026 Settimo di Pescantina
Verona
Italy



www.ecolab.com

www.anios.com