



## AGENTE NEUTRALIZZANTE DI RISCIAQUO PER LA STRUMENTAZIONE

### Anios RDA

#### AGENTE NEUTRALIZZANTE DI RISCIAQUO, ATTIVATORE DI ASCIUGATURA

- Per un finish più splendente e senza tracce
- Può essere utilizzato con qualsiasi qualità d'acqua
- Elevata compatibilità con i polisolfoni e il poliossimetilene



# Anios RDA

Agente neutralizzante di risciacquo, attivatore di asciugatura



Anios RDA  
5 L tanica

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Giallo pallido, liquido trasparente
- pH prodotto puro a 20°C: min 2,1 - max. 4
- pH diluito allo 0,03%\*: circa 4
- pH diluito allo 0,1%\*: circa 3,6
- Densità a 20°C: 1,035
- Conduttività dallo 0,03% allo 0,1%: 67 - 139  $\mu\text{S}/\text{cm}$

\* Misurazione del valore di pH in condizioni di utilizzo sempre mediante un pH metro con temperatura di compensazione.

## INFORMAZIONI D'ORDINE E CONFEZIONAMENTO

PRODOTTO	UNITÀ DI CONFEZIONAMENTO	CODICE D'ORDINE	CND	RDM
Anios RDA	2 x 5 L tanica	AN2372038	V07 - prodotti per pulizia di dispositivi medici non compresi in altre classi	1139567/R

## AREA DI APPLICAZIONE

Prodotto per il risciacquo di strumenti medico-chirurgici e dispositivi medici in una macchina automatica alimentata sia con acqua purificata che non purificata per osmosi. Effetto neutralizzante sui residui alcalini dei detergenti, rimozione dei residui minerali dall'acqua durante il ciclo di lavaggio. Attivatore di asciugatura.

## ISTRUZIONI PER L'USO

Soluzione concentrata per uso professionale. Utilizzare ad una diluizione da 0,03% a 0,1% (cioè da 0,3 a 1 ml per litro d'acqua) durante il ciclo di risciacquo. Compatibile con i cicli di disinfezione termica.

## INGREDIENTI

Tensioattivi non ionici e anionici, acido lattico, etanolo ed eccipiente.

## STOCCAGGIO

Pericoloso - rispettare le precauzioni per l'utilizzo (redatto secondo le norme europee vigenti in materia di classificazione ed etichettatura dei prodotti chimici). Conservazione: tra +5°C e +25°C.

## CERTIFICATI

Su richiesta saremo lieti di fornirvi i certificati.

## USO SICURO DEL DISPOSITIVO MEDICO

Leggere le informazioni e l'etichetta del prodotto.



SOLO PER USO PROFESSIONALE



**LABORATOIRES ANIOS**  
1, Rue de l'Espoir  
59260 Lezennes  
France

Distribuito da:  
**NUOVA FARMAC SRL**  
Via W. Flemming, 7  
37026 Settimo di Pescantina  
Verona  
Italy



[www.ecolab.com](http://www.ecolab.com)

[www.anios.com](http://www.anios.com)