



**ELEVATO POTERE DETERGENTE
E DISINFEZIONE EFFICACE**

Sekusept™ Pulver CLASSIC

DISINFEZIONE PER IL RIPROCESSAMENTO MANUALE DEGLI STRUMENTI MEDICALI

Sekusept Pulver Classic è un disinfettante in polvere a rapida azione per l'uso su strumenti.

Sekusept Pulver Classic fornisce:

- Potente formulazione
- Efficace disinfezione degli strumenti



Sekusept™ Pulver CLASSIC

Disinfezione per il riprocessamento manuale degli strumenti medicali

COMPATIBILITA' DEI MATERIALI

Sekusept Pulver Classic è ideale per la pulizia e la disinfezione di una vasta gamma di strumenti medici in metallo ed elastomeri, nonché policarbonati, plexiglass (PMMA) e polisolfone.

PERFORMANCE DI PULIZIA



Grazie ai suoi ingredienti, Sekusept Pulver Classic mostra una elevata performance di pulizia con brevi tempi di contatto e basse concentrazioni d'uso.

PERFORMANCE DI DISINFEZIONE

Sekusept Pulver Classic è stato sottoposto a una serie di test e valutazioni complete - microbiologiche, virologiche, tossicologiche ed ecologiche. Mostra un alto livello di efficacia contro un ampio spettro di virus e batteri, come si può vedere nella tabella di efficacia riportata qui sotto.

TABELLA DI DOSAGGIO

SOLUZIONE LITRO	CONCENTRAZIONE DELLA SOLUZIONE DI UTILIZZO					
	1%		2%		4%	
	gr	ml	gr	ml	gr	ml
1 Litri	10	12.5	20	25	40	50
2 Litri	20	25	40	50	80	100
4 Litri	40	50	80	100	160	200
8 Litri	80	100	160	200	320	400
10 Litri	100	125	200	250	400	500
20 Litri	200	250	400	500	800	1000
30 Litri	300	375	600	750	1200	1500

1 ml = 0.8 g  1 cucchiaino dosatore = 20 g polvere = 25 ml  1 bicchiere dosatore = 160 g polvere = 200 ml

PROPRIETA' MICROBIOLOGICHE

RIVENDICAZIONI/CONDIZIONI	CONCENTRAZIONE	TEMPO DI CONTATTO MIN.
Battericida - Secondo EN 13727 e EN 14561, in condizioni di sporco	4,0%	15 min
	2,0%	60 min
Lieviticida - Secondo EN 13624 e EN 14562, in condizioni di sporco	4,0%	15 min
	2,0%	60 min
Efficace contro i virus incapsulati Secondo DVV2008/EN 17111	2%	15 min
Virucida Secondo DVV2008/EN 17111	2%	120 min
Adenovirus Secondo DVV2008/EN 17111	2%	15 min
Rotavirus Secondo la raccomandazione RKI 01/2004*	1%	60 min
SV40. Secondo la raccomandazione RKI 01/2004*	2%	5 min
Disinfezione di Strumenti - Secondo VAH (battericida e lieviticida) in condizioni di Pulito e Sporco	4,0%	15 min
	2,0%	60 min

*DVV 2008

INFORMAZIONI D'ORDINE

PRODOTTO	UNITA' DI CONFEZIONAMENTO	CODICE D'ORDINE
Sekusept Pulver Classic con cucchiaino dosatore	4 x 2 kg	3049440
Sekusept Pulver Classic con bicchiere dosatore	10 kg	3049520

AREA DI APPLICAZIONE

Per la pulizia e la disinfezione manuale di una gamma di dispositivi medici. Non è adatto all'uso su endoscopi flessibili o strumenti in alluminio o con superfici cromate o placcate con nichel.

ISTRUZIONI PER L'USO

Per la preparazione della soluzione utilizzata per il trattamento, utilizzare il cucchiaino/bicchieri di misurazione in dotazione. Aggiungere la quantità di polvere richiesta nell'acqua in costante agitazione e ripetere l'agitazione più volte durante i primi 15 minuti.

Immergere gli strumenti assicurandosi che tutte le superfici siano completamente bagnate. Pulire gli strumenti secondo le istruzioni del produttore, compresa l'azione meccanica (ad esempio: spazzolamento, strofinamento) fino a visibile pulizia.

Rimuovere gli strumenti dopo il tempo di contatto richiesto e risciacquare con acqua di qualità almeno potabile. Asciugare successivamente le superfici esterne e i canali interni (ad esempio degli endoscopi rigidi).

Per la disinfezione terminale si prega di riprocessare di conseguenza. La soluzione deve essere preparata fresca per ogni giorno lavorativo. In caso di sporco visibile, preparare immediatamente una nuova soluzione.

INGREDIENTI

Percarbonato di sodio, fosfato, tensioattivi non ionici. Il principio attivo acido peracetico viene generato nella soluzione.

STOCCAGGIO

Pericoloso. rispettare le precauzioni per l'utilizzo (Redatto secondo le norme europee vigenti in materia di classificazione ed etichettatura dei prodotti chimici). Conservazione: tra +5°C e +25°C.

CERTIFICATI

Dispositivo medico. L'attività antimicrobica completa per Sekusept Pulver Classic è contenuta nel dossier scientifico, disponibile su richiesta.

USO SICURO DEL DISPOSITIVO MEDICO

Leggere le informazioni e l'etichetta del prodotto.



SOLO PER USO PROFESSIONALE.

ECOLAB SRL
Via Trento 26
20871 VIMERCATE (MB)
Italia



ECOLAB DEUTSCHLAND GmbH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
Germany



www.ecolab.com