



## DETERGENTE DISINFETTANTE PER DISPOSITIVI MEDICI

### SURFANIOS Premium MD

#### DETERGENTE DISINFETTANTE PER DISPOSITIVI MEDICI

Pulizia e disinfezione di dispositivi medici non invasivi prima del loro utilizzo e secondo le relative istruzioni per l'uso.

- Doppia azione: combinazione di un'azione detergente e disinfettante in una operazione simultanea
- Ampio spettro di efficacia con brevi tempi di contatto
- Agente chelante facilmente biodegradabile



DM Classe IIa

CND: D99 - Disinfettanti e antisettici - Altri

**ECOLAB®**

[www.ecolab.com](http://www.ecolab.com)

LABORATOIRES  
**ANIOS**  
An Ecolab Company

[www.anios.com](http://www.anios.com)

# SURFANIOS Premium MD

Detergente disinfettante per dispositivi medici



Surfanios Premium  
5 L Tanica



Surfanios Premium  
1 L Flacone

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Soluzione colorata verde
- pH del prodotto puro: 10.10
- pH del prodotto diluito (0.25%): circa 8.6
- Densità a 20°C: 1.009 g/ml
- Indice di rifrazione: 1.3587

## PROPRIETÀ MICROBIOLOGICHE

EFFICACIA	CONCENTRAZIONE	TEMPO DI CONTATTO
Battericida - Secondo: EN 13727* (5 min 0.25%), EN 16615* (15 min, 0.25%)	0.25 %	15 min
Lieviticida - Secondo: EN 13624* (15 min, 0.25%), EN 16615* (15 min, 0.25%)	0.25 %	15 min
Tuberculocida - Secondo EN 14348*	0.50 %	30 min
Attivo sui virus incapsulati secondo EN 14476*	0.25 %	5 min
Virucida a spettro limitato secondo EN 14476*	2.0 %	30 min
EN 14476* Adenovirus	1.0 %	30 min
EN 14476* Norovirus (MNV)	1.0 % / 2.0 %	60 min / 30 min

\* condizioni di sporco

## INFORMAZIONI D'ORDINE

PRODOTTO	UNITÀ DI CONFEZIONAMENTO	CODICE D'ORDINE
SURFANIOS Premium	4 x 5 L	AN2290036
SURFANIOS Premium (con erogatore integrato da 20 ml)	12 x 1 L	AN2290092



LABORATOIRES ANIOS  
1, Rue de l'Espoir  
59260 Lezennes  
France

Distribuito da:  
**NUOVA FARMEC SRL**  
Via W. Flemming, 7  
37026 Settimo di Pescantina  
Verona, Italy



www.ecolab.com



www.anios.com

## CAMPO DI APPLICAZIONE

Detergente disinfettante per dispositivi medici.

Pulizia e disinfezione di dispositivi medici non invasivi prima del loro utilizzo e secondo le relative istruzioni per l'uso.

## MODALITÀ D'USO

Soluzione concentrata.

Diluire il concentrato con acqua fino alla concentrazione desiderata.

Per diluire ad esempio a una concentrazione di 0,25% (2,5 ml / l), aggiungere 20 ml per 8 litri d'acqua fredda o calda (max. + 60 °C).

Applicare in quantità sufficiente (+/- 30 ml/m<sup>2</sup>).

Rispettare il tempo di contatto indicato per l'attività antimicrobica desiderata.

Risciacquare abbondantemente con acqua per eliminare qualsiasi residuo di prodotto.

Per la frequenza d'uso e la pulizia dell'attrezzatura di trattamento, fare riferimento al protocollo d'igiene vigente.

Dossier scientifico (efficacia, compatibilità, ecc.) disponibile su richiesta.

## INGREDIENTI

N-(3-amminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diammina (N° CAS 2372-82-9: 51 mg/g), Cloruro di didecildimetilammonio (n° CAS 7173-51-5: 25 mg/g), tensioattivi non ionici, agenti sequestranti, profumo, coloranti ed eccipienti.

## CERTIFICATI

Dispositivo medico.  
L'attività antimicrobica completa del SURFANIOS Premium è inclusa nel Dossier Scientifico, disponibile su richiesta.

## STOCCAGGIO

Stoccaggio: tra +5°C e +25°C.

## USO SICURO DEL DISPOSITIVO MEDICO

Si prega di leggere l'etichetta e le informazioni sul prodotto.



SOLO PER USO PROFESSIONALE