

CONFORMITA' CHE GARANTISCE LA DISINFEZIONE AMBIENTALE

Incidin™ OxyWipe S

DETERGENTE E DISINFETTANTE SPORICIDA (*C. DIFFICILE*) PRONTO ALL'USO

La formulazione avanzata di Incidin™ OxyWipe S fornisce i benefici di una soluzione brevettata* di perossido di idrogeno con efficacia ad ampio spettro.

Sono efficaci contro una vasta gamma di agenti patogeni e non lasciano residui attivi grazie alla loro rapida evaporazione.

- Il principio attivo si decompone in acqua e ossigeno
- Efficacia sporicida (*C. difficile*) e virucida
- Elevata compatibilità con i materiali
- L'efficacia di Incidin OxyWipe S è confermata per il liquido rilasciato dalla salvietta



*Brevetto Europeo EP1987121

DM Classe IIb

CND: D0599 - Ossigenoproduttori per
disinfezione di Dispositivi Medici - Altri

ECOLAB®
PROTECTING WHAT'S VITAL™

Incidin™ OxyWipe S

DETERGENTE E DISINFETTANTE SPORICIDA (C. DIFFICILE)
PRONTO ALL'USO

EFFICACIA

- Efficacia ad ampio spettro

SICUREZZA

- Il principio attivo si decompone in acqua e ossigeno
- Elevata compatibilità con i materiali

CONVENIENZA

- Pulisce e disinfetta in un unico passaggio
- Formati pronti all'uso

PROPRIETA' MICROBIOLOGICHE

EFFICACIA PRODOTTO NON DILUITO	TEMPO DI CONTATTO
Disinfezione di superfici con azione meccanica secondo il metodo VAH 2015	
Battericida, lieviticida	15 min*
Fungicida	30 min*
Micobattericida	30 min*
Battericida secondo EN 13727 (2 min) / EN 16615 (2 min*)	2 min*
Lieviticida secondo EN 13624 (15 min) / EN 16615 (1 min*)	15 min*
Fungicida secondo EN 13624 (30 min) / EN 16615 (metodo) (5 min*)	30 min*
Tubercolocida secondo EN 14348 (30 min) / EN 16615 (metodo) (5 min*)	30 min*
Micobattericida secondo EN 14348 (30 min) / EN 16615 (metodo) (5 min*)	30 min*
Efficace contro i virus incapsulati secondo EN 14476	30 sec*
Spettro virucida limitato secondo EN 14476 (Adenovirus - 30 sec, Norovirus - 15 min)	15 min**/**
Virucidi secondo EN 14476	30 min**
Sporicida contro C. difficile secondo EN 17126	60 min**
Sporicida contro C. difficile secondo EN 16615 (metodo) acc. CEN TC216 prWI ottobre 2020 / metodo VAH 19	15 min**
Efficace contro i virus incapsulati secondo la raccomandazione RKI 10/2022	30 sec***
Spettro virucida limitato	60 min***
Adenovirus	1 min***
Polyomavirus SV40	30 sec***
Rotavirus	15 sec***

* in condizioni di sporo ** in condizioni di pulito *** DVV 2015 (prova di sospensione)

INFORMAZIONI D'ORDINE E CONFEZIONAMENTO

PRODOTTO	UNITA' DI CONFEZIONAMENTO	CODICE D'ORDINE
Incidin™ OxyWipe S	6 x 100 salviette (20 x 20 cm)	3116060
Incidin™ OxyWipe S XL	6 x 50 salviette (25 x 37 cm)	3116680
Dispenser a parete per Incidin™ OxyWipe S (acciaio inox)	6 x 1	100 338 77
Dispenser a parete per Incidin™ OxyWipe S (in polipropilene)	12 x 1	100 576 86

IGIENE
AMBIENTALE



AREA DI APPLICAZIONE

Salvietta pronta all'uso per la pulizia e disinfezione ad ampio spettro per dispositivi medici non invasivi, invasivi e non immergibili.

ISTRUZIONI PER L'USO

Prendere una singola salvietta. Bagnare la superficie accuratamente, assicurando il contatto con l'intera superficie. Lasciare asciugare e non risciacquare. Non riutilizzare la salvietta: la disinfezione non è più garantita. Chiudere il tappo dopo l'uso. Rispettare il tempo di contatto e le condizioni indicate per ottenere l'attività antimicrobica richiesta. Se utilizzato in condizioni di pulito, pulire preventivamente la superficie (utilizzare una nuova salvietta per ogni fase). L'uso di un prodotto per la pulizia e disinfezione non sostituisce la regolare pulizia. Non utilizzare su superfici sensibili agli agenti ossidanti, come marmo, rame o ottone. Per il ritrattamento dei dispositivi medici osservare sempre le istruzioni d'uso del produttore, compresa la compatibilità dei materiali. Per la disinfezione terminale di dispositivi medici semicritici (ad es. sonde & sonde TEE): se l'immersione non è possibile, disinfettare il dispositivo con una salvietta come descritto sopra. In questo caso, risciacquare accuratamente con acqua potabile, una volta trascorso il tempo di contatto.

INGREDIENTI

100 g contengono il seguente principio attivo:
1,5 g Perossido di idrogeno (CAS 7722-84-1)

STOCCAGGIO

Il prodotto dovrebbe essere conservato nella confezione originale, in un luogo fresco e asciutto, ad una temperatura tra 5°C e 25°C e al riparo dalla luce del sole.

La durata di conservazione dopo l'apertura è di 3 mesi.

USO SICURO DEL DISPOSITIVO MEDICO

Leggere l'etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell'uso.



SOLO PER USO PROFESSIONALE.

ECOLAB EUROPE
Richtstrasse 7
8304 Wallisellen
Switzerland



ECOLAB SRL
Via Trento, 26
20871 Vimercate
(MB) - Italia

